

RQ9126 ПРОГРАММА ПО ЛИПИДАМ

Английский язык

ПРОГРАММА ПО ЛИПИДАМ: RQ9126

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАБОРА И ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ

Убедитесь, что в наборе присутствует правильное количество образцов, а также, что Ваши образцы соответствуют параметрам, указанным ниже в разделе «ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА». Убедитесь, что ни один из флаконов не поврежден и немедленно уведомьте Вашего представителя «Рендокс» в случае любых несоответствий. В завершение, зайдите в личный кабинет на сайте www.riqas.net для подтверждения точной даты получения данного набора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Данная упаковка содержит 12 флаконов с лиофилизированными образцами объемом 3 мл. Флаконы имеют этикетки, на которых указан номер образца.

ПОДГОТОВКА/ХРАНЕНИЕ/СТАБИЛЬНОСТЬ ОБРАЗЦОВ

Образцы упакованы под вакуумом. Осторожно откройте крышку флакона, избегая потери материала. Используя откалиброванную пипетку, добавьте точно 3 мл свежей бидистиллированной воды температурой 20-25°С. Закройте флакон пробкой и оставьте на 30 минут перед использованием. Убедитесь, что все сухое содержимое полностью растворилось, аккуратно взбалтывая флакон. Проведите анализ образца в течение 2-х суток после разведения. Данные образцы следует подготавливать и обращаться с ними таким же образом, как и с образцами пациентов. Образцы следует хранить при 2-8°С, когда они не используются.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Данные образцы изготовлены на основе человеческой сыворотки крови. Образец был проверен на отсутствие антител к ВИЧ, поверхностного антигена гепатита В и гепатита С. Однако, так как ни один из методов тестирования не дает полной гарантии отсутствия инфекционных агентов, обращаться и утилизировать данный материал и все образцы пациентов следует как потенциально опасные.

Только для использования IN VITRO.

* ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Результаты исследований должны поступить в «РИКАС» не позднее 17:00 по Гринвичу (20:00 по МСК) ФИНАЛЬНОЙ ДАТЫ (дата окончания приема результатов). Если проведение анализа в РЕКОМЕНДУЕМУЮ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА не обеспечивает достаточное количество времени для отправки результатов, рекомендуется проводить анализ раньше, чтобы успеть отправить результаты до финальной даты. Опоздавшие результаты не будут приняты.

ПРОГРАММА ПО ЛИПИДАМ ДАТЫ ОТПРАВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЦИКЛ 51

HOMEP	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	ФИНАЛЬНАЯ ДАТА
ОБРАЗЦА	АНАЛИЗА	
1	08.07.2024	15.07.2024
2	22.07.2024	29.07.2024
3	05.08.2024	12.08.2024
4	19.08.2024	26.08.2024
5	02.09.2024	09.09.2024
6	16.09.2024	23.09.2024
7	30.09.2024	07.10.2024
8	14.10.2024	21.10.2024
9	28.10.2024	04.11.2024
10	11.11.2024	18.11.2024
11	25.11.2024	02.12.2024
12	09.12.2024	16.12.2024





0010