

ПРОГРАММА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ: RQ9187

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАБОРА И ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ

Убедитесь, что в наборе присутствует правильное количество образцов, а также, что Ваши образцы соответствуют параметрам, указанным ниже в разделе «ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА». Убедитесь, что ни один из флаконов не поврежден и немедленно уведомьте Вашего представителя «Рендокс» в случае любых несоответствий. В завершение, зайдите в личный кабинет на сайте www.riqas.net для подтверждения точной даты получения данного набора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Данная упаковка содержит 6 флаконов с жидкими образцами объемом 1 мл. Флаконы имеют этикетки, на которых указан номер образца.

ПОДГОТОВКА/ХРАНЕНИЕ/СТАБИЛЬНОСТЬ ОБРАЗЦОВ

Образцы готовы к использованию. Перед анализом необходимо довести образцы до комнатной температуры. Во избежание испарения, закройте флакон пробкой сразу после использования и храните при температуре 2-8°С. Проведите анализ образца в течение 2-х суток после открытия. Данные образцы следует подготавливать и обращаться с ними таким же образом, как и с образцами пациентов. Образцы следует хранить при 2-8°С, когда они не используются.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Данные образцы изготовлены на основе человеческой сыворотки крови. Источник был проверен на отсутствие поверхностного антигена гепатита В и антител к ВИЧ. Однако для полной защиты рекомендуется при работе с сывороткой применять такие же меры безопасности, как и при работе с образцами пациентов.

Только для использования IN VITRO.

* ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Результаты исследований должны поступить в «РИКАС» не позднее 17:00 по Гринвичу (20:00 по МСК) ФИНАЛЬНОЙ ДАТЫ (дата окончания приема результатов). Если проведение анализа в РЕКОМЕНДУЕМУЮ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА не обеспечивает достаточное количество времени для отправки результатов, рекомендуется проводить анализ раньше, чтобы успеть отправить результаты до финальной даты. Опоздавшие результаты не будут приняты после финальной даты для следующего образца.

ПРОГРАММА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДАТЫ ОТПРАВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИИКЛ 5В

1 -		
HOMEP	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	ФИНАЛЬНАЯ ДАТА
ОБРАЗЦА	АНАЛИЗА	
7	09.09.2024	16.09.2024
8	14.10.2024	21.10.2024
9	11.11.2024	18.11.2024
10	09.12.2024	23.12.2024
11	13.01.2025	20.01.2025
12	10.02.2025	17.02.2025



